

ANIOS R444

CE

Renovador del Instrumental de inox



- Elimina las manchas de óxido (pasivación)
- Suprime los depósitos minerales
- Utilización en remojo: sistema de dosificación incorporado

INDICACIONES

Producto especial para pulir los instrumentos de acero inoxidable y los dispositivos médicos. Elimina los restos proteicos, los depósitos de óxido de hierro y otras manchas de oxidación.

CARACTERÍSTICAS

- Solución líquida límpida.
- Densidad a 20°C: 1,360 +/- 0,005
- pH (producto diluido) a +20°C : aprox 1,25

PRODUCTO
PARA DILUIR
50 ml → 1 L



ANIOS R444

Renovador del Instrumental de inox.

MODO DE EMPLEO

Antes de utilizar el producto, protéjase adecuadamente: mascarilla, gafas y guantes)

Solución concentrada para uso profesional.

Utilización en remojo para diluir un 5 % en agua templada.

- Sumerja el instrumental.
- Tiempo de remojo: de 1 a 2 horas (controle el estado del instrumental cada 30 minutos).
- Extraiga el instrumental del baño cuando esté bien pulido.
- Enjuague abundantemente y seque.
- Renovar el baño de remojo al menos una vez al día.

PRECAUCIONES DE USO

Producto peligroso. Respétense las precauciones de empleo (establecidas según la Directiva Europea 99/45/CE). Almacenamiento: de +5°C a +35°C.

ACONDICIONAMIENTO

3 frascos de 1 L dosificador.....Réf. 0191.137

