

ANIOSYME DLT PLUS

Detergente
trienzimático
para instrumentos



- Detergente bacteriostático y fungistático a la disolución de uso
- Complejo trienzimático detergente de alto rendimiento (PND)
- Fórmula patentada
- Control de la corrosión
- Seguridad y facilidad de uso
- pH neutro: compatibilidad con todo tipo de materiales
- Se utiliza en remojo, en máquina y en recipiente de ultrasonidos


INDICACIONES

Limpieza de instrumentos médico-quirúrgicos en recipiente de remojo, en recipientes de ultrasonidos o en máquina automática.

CARACTERÍSTICAS

- Ausencia de biocontaminación del baño de remojo
- Estabilidad del complejo trienzimático probada
- Solución cristalina de color azul
- pH del producto puro y diluido: neutro (aprox. 7)
- Se puede utilizar en agua fría y caliente

PRODUCTO A DILUIR
25 ml → 5 litros

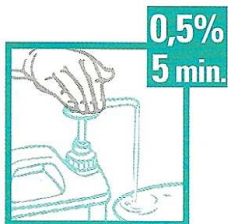


ANIOSYME DLT PLUS

Detergente trienzimático para instrumentos


MODO DE EMPLEO




1
En remojo: Disolución al 0,5%:
verter una dosis de 25 ml por
5 litros de agua fría o templada.

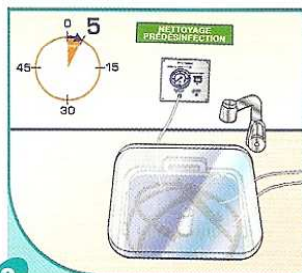

2
Sumergir completamente el
dispositivo médico.
**Tiempo de remojo
recomendado: 5 min.**
Cepillar si es necesario.
Para el material endoscópico:
utilizar escobilla.

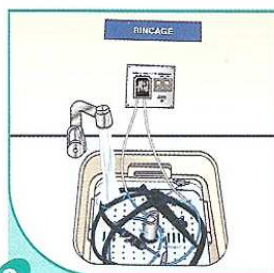

3
Aclarar con cuidado el
dispositivo médico con agua
de red (de buena calidad
microbiológica).
Para el material endoscópico:
el exterior y el interior del
dispositivo médico.

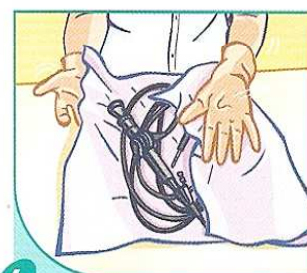

4
Limpiar con un campo limpio.
Pasará a la etapa siguiente
(ver protocolo interno del
establecimiento).

A máquina: ANIOSYME DLT Plus se utiliza de 2 a 3 g/L. Temperatura máxima: +60°C

COMPOSICIÓN CUALITATIVA

Tensioactivos no iónicos, complejo trienzimático (proteasa, lipasa y amilasa), estabilizador de enzimas, secuestrante, agente conservador, colorante, excipientes.

PROPIEDADES MICROBIOLÓGICAS

Estudio

Resistencia a la contaminación microbiana
según la Farmacopea Europea (1997)

Condiciones

Producto puro
Producto diluido (0,5%)

PRECAUCIONES DE USO

Peligroso. Respetar las precauciones de uso (establecidas según la Directiva 99/45/CE y sus adaptaciones). Información disponible en la Ficha de Datos de Seguridad y en la etiqueta.
Almacenaje: de +5°C a +35°C.

ACONDICIONAMIENTO

• 4 bidones de 5 litros con bomba dosificadora.....Ref. 1559.036



LECTUS

lectus@lectus.com.ar
www.lectus.com.ar