

ANIOSYME⁵ SYNERGY

5 ENZYMES PARA 1 PRODUCTO ÚNICO

- Detergente de 5 enzimas de amplio espectro de eficacia
- Aplicación múltiple: remojo, bandeja de ultrasonidos, lavadora-desinfectadora
- Eficaz tras 1 minuto en lavadora-desinfectadora
- Eficaz en cualquier calidad de agua (suavizada, agua de red...)
- Producto no clasificado como peligroso para el medio ambiente
- Formulado sin COV, pH neutro en la dilución de uso

INDICACIÓN

Limpieza del material quirúrgico y médico, de los dispositivos médicos en remojo, bandeja de ultrasonido, lavadora automática y túnel de lavado.

ANIOSYME SYNERGY 5, con sus 5 enzimas (amilasa, celulasa, lipasa, mananasa y proteasa), asegura un amplio espectro de eficacia sobre los componentes de cualquier tipo de contaminación.

CARACTERÍSTICAS

- Viscosidad (producto puro): 10 mPa.s
- Densidad: aproximadamente 1,115
- pH (producto puro): aprox. 8
- pH (producto diluido): aprox. 7,25 (neutro)
- Testado conforme a los indicadores de limpieza disponibles:
 - PLD sobre diferentes tipos de contaminaciones a remojo (grasa y sangre)
 - Tests embarcados en lavadoras-desinfectadoras,
 - ATPmetría,
 - En contaminación denominada "Alemana" descrita por la norma EN 15883 en bandejas de ultrasonidos

COMPOSICIÓN

Tensioactivos no iónico y aniónico, agente secuestrante, agente estabilizante, complejo enzimático, excipientes.

INSTRUCCIONES DE USO

Utilización en las diluciones comprendidas entre 0,05 y 0,5%. Adaptar la concentración, el tiempo de contacto y la temperatura del agua de dilución en función del grado de contaminación y del método de limpieza utilizado. Cepillar si fuera necesario. Aclarar cuidadosamente. Temperatura máxima: 60°C.

PRECAUCIONES DE USO

Peligroso - respete las precauciones de uso (establecidas según la Directiva 99/45/CE y sus adaptaciones). Almacenamiento entre 5°C y 35°C. Dispositivo médico de clase I (Directiva 93/42/CEE modificada).



ENVASES

Utilización a remojo o en bandeja de ultrasonidos

12 frascos de 1L dosificador Ref. 2235.095

4 bidones de 5 l + bomba de 25 ml Ref. 2235.036

Utilización a máquina

2 bidones de 5 l Ref. 2235.038



Laboratoires
ANIOS
Le professionnel de la désinfection

Pavé du Moulin
59260 Lille-Hellemmes - France
Tél. +33 3 20 67 67 67 - Fax : +33 3 20 67 67 68
www.anios.com

