

ANIOSYME SYNERGY MTU

DETERGENTE TRIENZIMATICO ULTRA CONCENTRADO

Indicado para el lavado manual por inmersión en batea del instrumental medico-quirúrgico como paso previo a la Esterilización o la Desinfección de Alto Nivel.



CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO

COMPONENTE	FUNCION	BENEFICIO
Agentes secuestrante de nueva generación	Eliminación de iones que interfieren en la limpieza	Mayor efecto desincrustante
Agentes dispersantes	Evita que se aglutinen partículas de residuos sólidos que pueden precipitar o sedimentar	Minimiza la posibilidad de redeposición de la materia orgánica en el PM
Tensoactivos de nueva generación	Posibilitan una más alta concentración enzimática	Potencia la eficacia detergente
Agente anticorrosivo	Protección superficies metálicas	Compatible con dispositivos médicos metálicos

- Dilución de uso: 2 ml/litro **rendimiento: 2.500 litros por bidón**
- Tiempo de contacto: **5 minutos**
- Detergente **trienzimático** para uso manual
- Formulación original: **acción desincrustante reforzada**
- Actividad proteásica reforzada: **muy alto poder detergente demostrado**
- Amplia compatibilidad con los materiales
- Excelente **perfil ecotoxicológico**

INFORMACIÓN DE PEDIDOS Y EMBALAJE

PRODUCTO	UNIDAD DE EMBALAJE	REFERENCIA
Synergy MTU - 5 litros + bomba dosif.-	caja de 4 bidones	SAAN1220
Synergy MTU - 1 litro con dosificador -	caja de 12 envases	SAAN1221

INSTRUCCIONES DE USO

Solución concentrada de uso profesional. Utilizar por inmersión a una dilución del 0,2% (2 ml por litro), respetando el tiempo de contacto de 5 minutos. Sumergir completamente el producto médico y cepillar si se observa suciedad visible. Enjuagar abundantemente con agua para eliminar todos los residuos. Reemplazar la solución al finalizar cada lavado.

COMPOSICIÓN

Complejo trienzimático (proteasa; lipasa; amilasa) en alta concentración, tensoactivos no iónicos y aniónicos, inhibidores de corrosión, excipientes.

PRODUCTO DE USO PROFESIONAL

Por favor lea el etiquetado del producto para más información.

