

ANIOXYDE 1000

AGENTE ESTERILIZANTE EN FRÍO EN
5 MINUTOS




Tomar el envase de **ACTIVADOR** que viene junto al bidón de **GENERADOR** de 5 litros.




Trasvasar el **contenido** del envase ACTIVADOR al bidón de 5 litros. **Mezclar y esperar 30 minutos.**




Verter la **solución activada** en el recipiente para inmersión del producto médico.

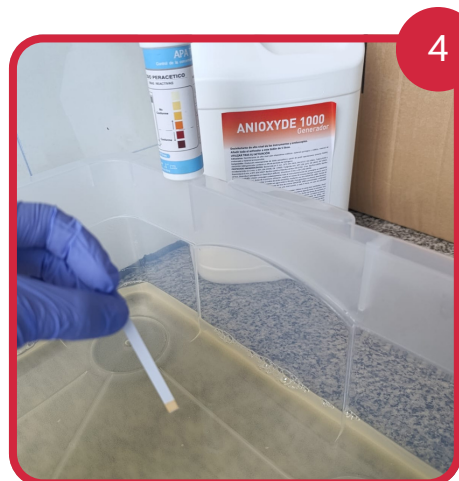

Utilizar una **tira reactiva** para confirmar la actividad del Anioxyde 1000

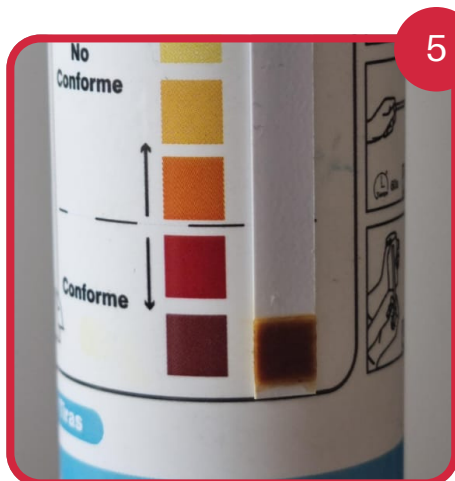

Mojar la tira durante **1 segundo**, sacarla sacudiéndola para eliminar el exceso de líquido. Lea el resultado **60 segundos** después de remojar. **Remitirse a los resultados**

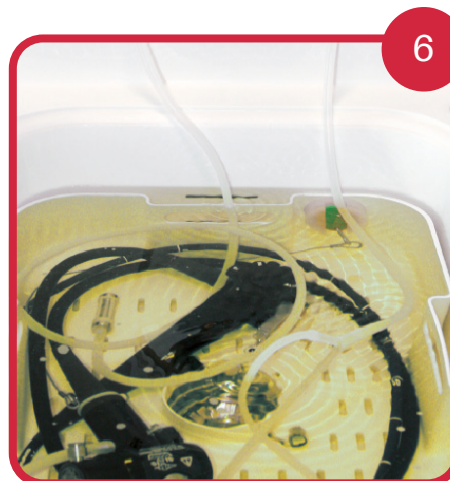


Resultado conforme. Introducir el producto médico. **Dejar 5 minutos.** **Retirar** el producto médico. **Enjuagar** con agua segura y **secar.**

RESULTADOS

ACIDO PERACETICO

TIRAS REACTIVAS

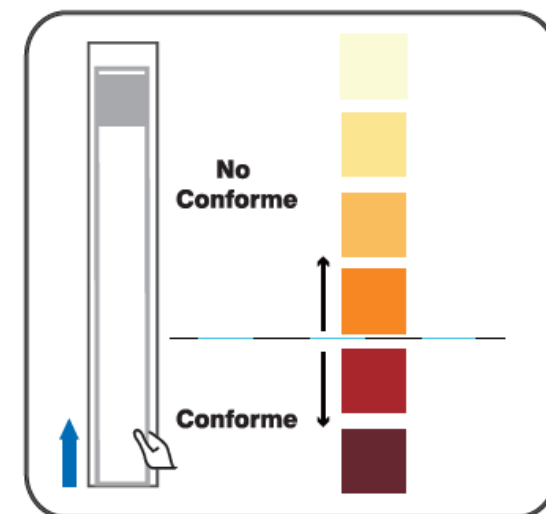

RECOMENDACIONES

- Respetar tiempos de contacto y diluciones de los productos
- Utilizar solo tiras reactivas APA TEST
- Conservación del baño de Anioxyde 1000: **14 días como máximo** (comprobar la conformidad del baño con una tira reactiva de control).