


ANIOSYME DLT PLUS

DETERGENTE TRIENZIMÁTICO

proteasa
lipasa
amilasa

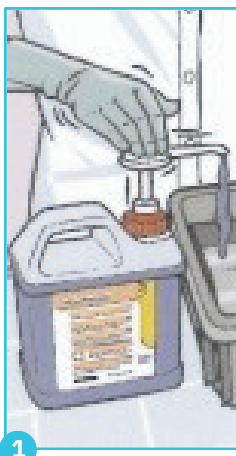

1

Colocar agua en una batea (No exceder los 45°C)



2

Agregar Aniosyme DLT plus en la proporción deseada



3


Dejar actuar 5 minutos

Sumergir completamente el instrumental quirúrgico o dispositivo médico en solución de lavado.




4

Cepillar si fuera necesario. Para material endoscópico utilizar escobilla

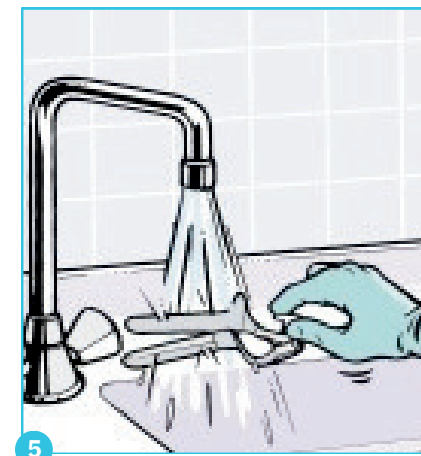

5

Enjuagar con abundante agua

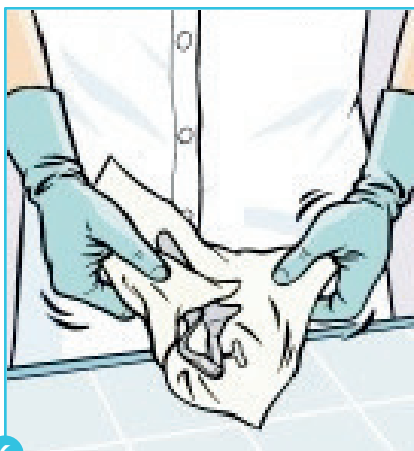

6

Secar con un campo limpio

Litros de agua	ml de detergente
1L	5ml
5L	25ml
10L	50ml
12L	60ml