

ANIOSYME SYNERGY MTU

proteasa
lipasa
amilasa

DETERGENTE TRIENZIMÁTICO




1 Colocar agua en una batea (No exceder los 45°C). Agregar Aniosyme Synergy MT en la proporción indicada



2 Sumergir completamente el instrumental quirúrgico o dispositivo médico en solución de lavado



3 Cepillar si fuera necesario. Para material endoscópico utilizar escobilla

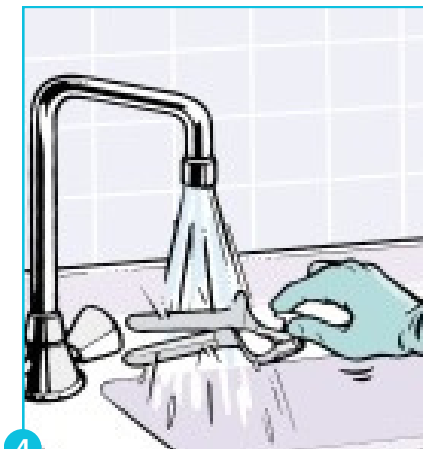

4 Enjuagar con abundante agua



5 Secar con un campo limpio

Litros de agua	ml de detergente
1L	2ml
5L	10ml
10L	20ml
12L	24ml