


ANIOSYME SYNERGY 5

DETERGENTE PENTAENZIMÁTICO - LAVADO MANUAL

proteasa
lipasa
amilasa

glucanasa
mananasa

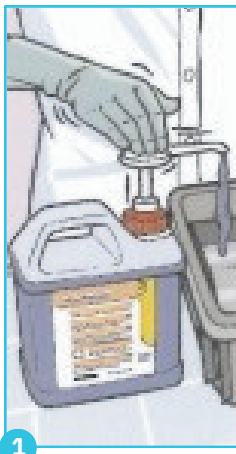

1



Colocar agua en una batea (No exceder los 45°C)



2

Agregar Aniosyme Synergy 5 en la proporción deseada

Ver tabla debajo

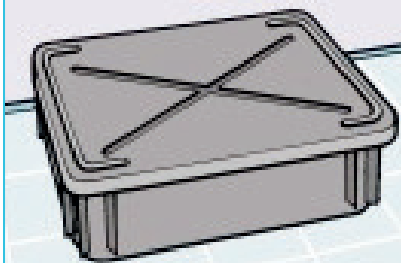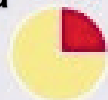


3

Sumergir completamente el instrumental quirúrgico o dispositivo médico en solución de lavado.



4

Cepillar si fuera necesario. Para material endoscópico utilizar escobilla

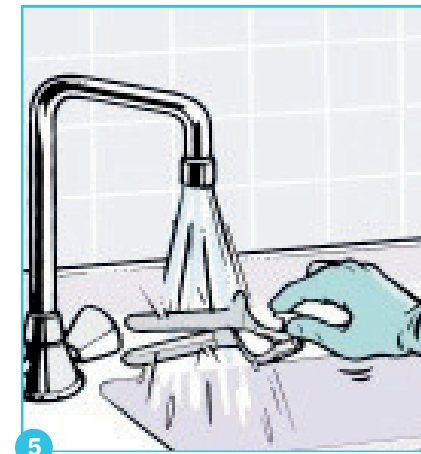

5

Enjuagar con abundante agua



6

Secar con un campo limpio

DILUCIÓN RECOMENDADA PARA LAVADO MANUAL

ml de detergente en 1L de agua	tiempo de contacto eficaz a partir de
2,5ml	5 minutos
5ml	1 minuto