

ANIOSYME X3

DETERGENTE DESINFECTANTE TRIENZIMÁTICO

proteasa · lipasa · amilasa



1

Colocar agua en una batea (No exceder los 45°C)




2

Agregar Aniosyme X3 en la proporción deseada




3

Sumergir completamente el instrumental quirúrgico o dispositivo médico en solución de lavado.

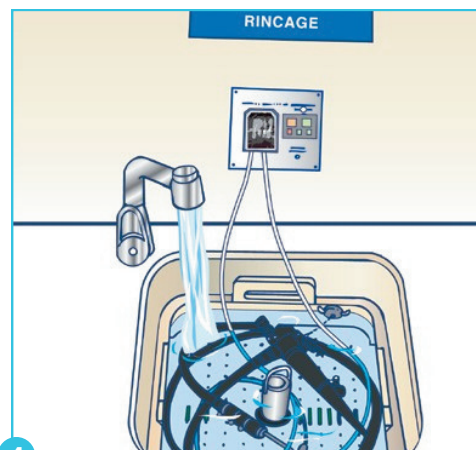

4

Cepillar si fuera necesario. Para material endoscópico utilizar escobilla

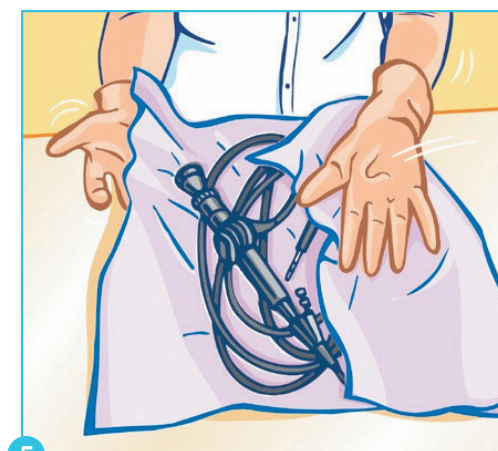

5

Enjuagar con abundante agua. Secar con un campo limpio



Litros de agua	ml de detergente
1L	5ml
5L	25ml
10L	50ml
12L	60ml