

OPASTER

Desinfectante de alto poder para dispositivos médicos y material termo-sensible.

1. Indicaciones

Opaster es una solución desinfectante de alto poder para la desinfección de dispositivos médicos, de instrumental quirúrgico, de material de endoscopia y material termo-sensible. Solución bactericida, fungicida, micobactericida, virucida en 5 minutos, y esporicida en 30 minutos.

2. Propiedades microbiológicas

Solución lista para usar bactericida en 5 min (EN 13727, EN 14561), fungicida en 5 min (EN 13624, EN 14562), micobactericida en 5 min (EN 14563), esporicida en 30 min (EN 13704), virucida en 5 min (EN 14476+A1) y activo sobre HIV-1, PRV (virus modelo HBV), BVDV (virus modelo HCV), herpesvirus.

3. Modo de empleo

Producto listo para ser utilizado y de uso profesional. No diluir. Limpiar y enjuagar abundantemente el dispositivo médico antes de sumergirlo en OPASTER. Cubrir la bandeja y dejar un tiempo de contacto de 5 minutos para bacterias, levaduras, hongos, virus y micobacterias, y 30 minutos para esporas de bacterias. No añadir ningún producto a OPASTER.

Enjuagar abundantemente con agua estéril o filtrada tras el remojo.

Conservación máxima del baño de remojo: 14 días.

Utilizar las tiras de control dadas para validar la actividad de la solución desinfectante.

4. Composición

100 g de solución contienen: 0,55 g de ortoftalaldehído (OPA), tampón, colorante y perfume.

5. Propiedades físico-químicas

- Aspecto: Solución azul claro
- pH a +20°C : 7,00 - 8,00
- Densidad: Aproximadamente 1,000

6. Precauciones de uso

Úsenle guantes adecuados. En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstresele la etiqueta o el envase. Manténgase fuera del alcance de los niños. No reutilizar el embalaje. No desechar directamente el producto en el medio ambiente. Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles. Almacenamiento: de +5° C a +30° C.

Posibles contraindicaciones

Trazas residuales causadas por un mal enjuague del dispositivo médico pueden provocar reacciones de tipo alérgico. La literatura describe reacciones de tipo anafiláctico en pacientes que padecen cáncer de vejiga y que se hayan sometido a cistoscopias repetidas.

Otras informaciones

- Periodo de validez: antes de la apertura del acondicionamiento: 24 meses
- Conservar el embalaje bien cerrado alejado de la luz y del calor (entre +5°C y +30°C).
- Estudio de compatibilidad disponible bajo petición.

7. Acondicionamientos

Seq.	Acondicionamiento primario	Acondicionamiento secundario	Código
1	Bidón de 5L	Cartón de 2 bidones	FA100023
	Bote de 50 tiras de control		PF 32226



INFORMACIONES RESERVADAS A LOS PROFESIONALES DE LA SALUD

Fecha de emisión / 08/01/03 - Fecha de revisión : 16/05/11
Edición N°3 - Código interno PF311- Versión traducida : E1PT 2009.09



Nuova Farmec srl
Via W. Flemming, 7
37026 Settimo di Pescantina (VR)
ITALY
Tel. +39 045 6767672 - Fax +39 045 6757111
www.farmec.it

